

L'oreiller personnalisé fait à vos mesures

DIRECTIVES D'UTILISATION

L'oreiller Ortho-Cerv supporte la région cervicale (cou) pendant le repos ou le sommeil. Ce support permet un soutien modéré et soulageant pour les muscles, tendons et ligaments de la région cervicale. Un stress à cette région peut influencer l'intégrité neuromusculaire crânienne, dorsale et lombaire.

Certains maux de tête, douleurs cervicales (cou), et dorsales aiguës ou chroniques peuvent provenir d'une faiblesse, d'un stress tissulaire ou d'une hypertonicité musculaire causée par une anomalie posturale. Ces anomalies peuvent influencer de façon négative les tissus (muscles, ligaments et tendons) pendant le sommeil.

UTILISATION

L'utilisation précise de cet oreiller permet de maximiser un résultat positif.

- En observant la surface de l'oreiller (celle qui démontre une récession centrale prononcée), c'est à cet endroit où l'on place la protrusion occipitale (l'arrière de la tête) lorsque l'on se couche sur le dos.

- Observez ainsi: il y a deux sections latérales externes. Ces deux sections sont d'une largeur différente et possèdent au centre, un support cervical afin d'accommoder la longueur du cou appropriée. Choisissez la section cervicale qui vous convient le mieux.

- Lorsque vous placez l'arrière de la tête dans la récession centrale, la section externe demeure indépendamment résistante à la pression et sert de support orthopédique des plus confortable.

- Pour ceux qui désirent dormir sur le côté, en se tournant, le corps se dirige vers l'endroit de l'oreiller qui augmente en épaisseur afin de compenser pour la différence de distance entre le côté du visage et l'extrémité de l'épaule.

N.B.: Même si le confort et le repos idéal sans douleur se réalisent généralement dès le premier soir, il se peut que, dans certains cas, une période d'adaptation d'une semaine à dix jours soit nécessaire.

DIRECTIVES D'ENTRETIEN DES OREILLERS

Qu'il s'agisse d'un oreiller rembourré de duvet, de plumes ou de fibres synthétiques, il doit être secouer quotidiennement pour conserver son gonflement. Brasser, serrer et donner des coups vigoureux sur l'oreiller en diagonale d'un coin à l'autre, à deux ou trois reprises.

LAVABLE

En étant lavable à la main, l'Ortho-Cerv est un oreiller pour tous les soirs. En voyage, votre oreiller personnel vous protégera contre le danger d'effets de santé compromettants qu'offrent les oreillers d'hôtels et de motels.

Ortho-Cerv

L'oreiller cervical

*L'oreiller cervical Ortho-Cerv,
un cadeau idéal pour votre
bien-aimé(e)!*



*Un sommeil reposant est
un excellent cadeau!*

Fabriqué pour:


Tél: 1-800-668-8550
orthocerv.com

Ortho-Cerv

L'oreiller cervical par excellence

Support cervical
pour longueur de
cou moyenne.

Région centrale
enveloppe l'arrière de
la tête et procure un
soutien complet.

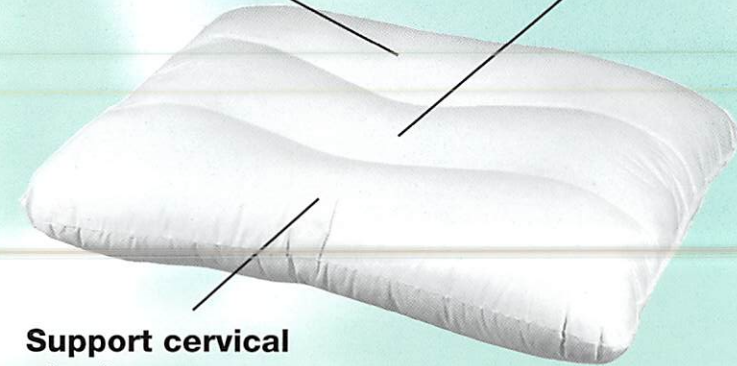

Support cervical
plus large pour
cou long.

Confortable
Hypoallergène
Excellente résilience
Trois positions de sommeil
Hypobactériogène
Fait à la main
Correction posturale
Fabriqué au Québec

● Confortable ● Hypoallergène ● Excellente résilience

CONFORTABLE

Rembourré de polyester, le duvet le plus moderne. Chaque fibre possède quatre (4) chambres à air. Le rôle des quatre chambres à air est d'emmagasiner l'air afin d'ébouriffer les fibres et de produire le gonflement et la résilience requise.

HYPOALLERGÈNE

Cette fibre de haute gamme est complètement hypoallergène.

TROIS POSITIONS DE SOMMEIL

Ortho-Cerv offre le choix de deux supports cervicaux soit pour un cou long ou court. Pour le sommeil sur le côté, chaque extrémité de l'oreiller est pleinement remplie afin d'assurer que la tête demeure horizontalement droite.

FAIT À LA MAIN

Ortho-Cerv est un composé de pièces de tissus cousues ensembles et rembourré scientifiquement de fibres de polyester selon les besoins de chaque personne. Cet oreiller est disponible en sept (7) épaisseurs et mesures de soutien pour adultes et deux (2) pour enfants. Convient aux taies d'oreillers standard. Les oreillers pour Grand et Très-Grand lits ainsi que de voyage sont aussi disponibles. Quelque soit l'épaisseur recommandé, essayez toujours l'oreiller sur votre matelas pour cinq minutes avant d'ouvrir le sac. C'est votre matelas qui influ sur la bonne épaisseur d'oreiller.

EXCELLENTE RÉSILIENCE


Chaque support cervical possède une quantité de fibres scientifiquement contrôlée afin d'effectuer une légère résistance à la pression appliquée par l'arrière du cou. Cette résistance modérée permettra le confort tout en supportant les tissus délicats (muscles, tendons et ligaments) cervicaux (cou).

HYPOBACTÉRIGÈNE

En plus d'être lavable, l'oreiller Ortho-Cerv, par sa méthode de fabrication, permet la circulation d'air à travers l'oreiller et élimine ainsi la possibilité de colonisation bactérienne.

CORRECTION ET ENTRAÎNEMENT POSTURAL

Par son invention, Ortho-Cerv sensibilise à dormir dans des positions stables, normales et correctives et, par conséquent, prévient la prédisposition au stress, et à la blessure tissulaire pendant le sommeil.

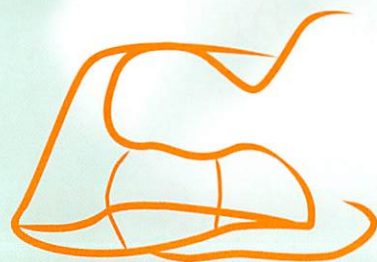

● Trois positions de sommeil

POURQUOI CERTAINS OREILLERS SONT-ILS PLUS COÛTEUX QUE D'AUTRES?

Les avantages d'un oreiller demeure dans sa composition, sa fabrication et la qualité de son rembourrage.

En général, le prix d'un bon oreiller cervical se situe entre 50\$ et 200\$, selon ses caractéristiques. Le choix d'un oreiller repose sur des considérations personnelles, notamment le budget, la prédisposition aux allergies ou le besoin suffisant de support cervical tout en recherchant le confort, la durabilité et la qualité. Les rembourrages de plumes d'oie sont coûteux, doivent être nettoyés à sec et peuvent provoquer des réactions allergiques. Les oreillers rembourrés de fibres sont moelleux et hypoallergènes; ils sont lavables à la main. Ils se situent dans la catégorie de prix moyen et sont donc économiques tout en offrant une excellente qualité.

● Hypobactérigène

● Fait à la main

● Correction posturale

QUE DEVRAIT-ÊTRE LA DURÉE D'UN OREILLER?

Le prix en soi n'est pas une garantie de durabilité. Plusieurs facteurs influencent la durée d'un oreiller: l'usage, l'entretien, la qualité de rembourrage et la fabrication.

Choisissez un oreiller qui est lavable, facile à ébouriffer et durable.

LES ALLERGIES INFLUENCENT-ELLES LE CHOIX?

Plusieurs personnes sont allergiques aux plumes et à la mousse d'uréthane (foam). Il est important de choisir un oreiller avec rembourrage certifié hypoallergène. Le polyester en est précisément un de ces genres de fibres.

FAIT SUR MESURE

Choisissez l'oreiller qui vous offre un confort et un support personnalisé et qui sera compatible avec vos caractéristiques anatomiques et votre mesure et forme cervicale (cou). L'oreiller Ortho-Cerv est disponible en une variété de sept (7) mesures d'épaisseurs pour adultes et deux (2) pour enfants.

LAVAGE À LA MAIN

- Laver à l'eau tiède avec un détergent doux (non-allergène).
- Appuyer sur l'oreiller pour faire pénétrer l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Presser pour extraire le surplus d'eau.
- Rincer à l'eau propre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de trace de détergent.
- Enlever le surplus d'eau en appuyant sur l'oreiller et le faire sécher par égouttement. Ne le suspendez pas car le rembourrage pourrait se tasser.
- Brasser l'oreiller lorsqu'il est parfaitement sec (donner des coups vigoureux en diagonale d'un coin à l'autre).
- Afin d'ébouriffer l'oreiller, placez-le dans la sècheuse à la température froide seulement. Ajouter quelques serviettes épaisses pour faciliter le culbutage et la reprise du gonflement.